

System til kontinuerlig glukoseovervågning CGM APP-opstartsvejledning

Oversigt over i3 CGM-systemet

Se brugervejledningen for at få alle instruktioner og oplysninger om systemet.


Brugervejledningen findes i elektronisk form. Du kan besøge iCan-cgm.com-hjemmesiden for at downloade vejledningen i PDF-format.

Hvis du har brug for en papirkopi af brugervejledningen, bedes du kontakte forhandleren eller sende anmodningen til e-mail:

support@icancgm.com. Den vil blive leveret gratis inden for syv dage.

Hvis du har spørgsmål, bedes du sende en e-mail til support@icancgm.com

Al grafik er repræsentativ. Dit produkt kan se anderledes ud.

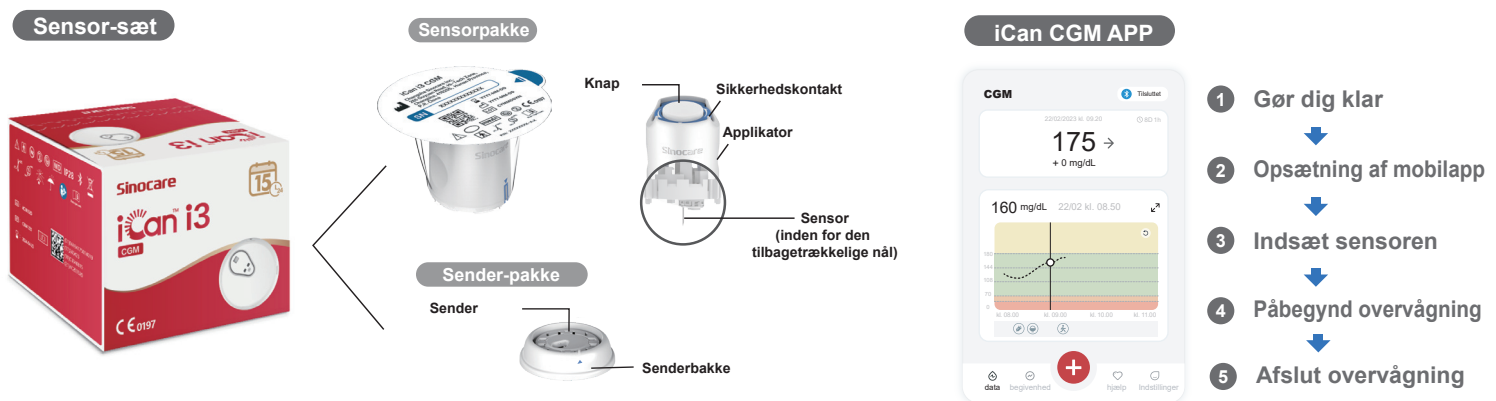

1 Kom i gang


Trin 1: Installer appen iCan CGM

Download appen iCan CGM fra App Store eller Google Play Butik



Trin 2: Log ind på din iCan CGM-konto

a. Log ind, hvis du allerede har en konto.
b. Tryk på "Registrer" i bunden, hvis du er ny i systemet. Appen vil guide dig gennem informationsvideoer og skærbilleder. Tryk på "Næste" for at fortsætte, indtil du kommer til siden Scanning af QR-kode. Hold din app åben hele tiden.

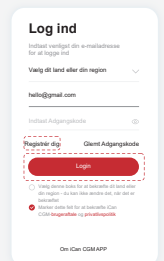


2 Par med senderen

Trin 1: Træk sender-pakken ud



Træk sender-pakken ud fra bunden af æsken til sensor-pakken.

Trin 2: Kontroller, at SN (serienummer)-koderne stemmer overens

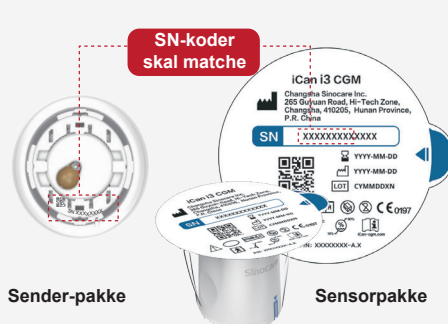

Kontrollér, at de første 8 cifre i SN (serienummer)-koden for sensorpakken og senderens SN (serienummer)-kode stemmer overens, før du parrer din sensor med senderen.

Trin 3: Par med senderen



a. Åbn din app, og sørg for at slå Bluetooth til.
b. Log ind på din konto, og brug din app til at scanne QR-koden på sensorpakken.
c. Parringen sker automatisk. Luk ikke appen, og hold den inden for 6 meter, mens du går videre til næste trin. Hvis du indtaster SN(serienummer)-koden manuelt, skal du klikke på "Næste" for at fortsætte.
d. Hold din telefon i nærheden, og forbered indsættelsen i næste trin

3 Indsæt sensoren


Følg "Hurtig startvejledning til system til kontinuerlig glukosemåling" i din pakke for at lære, hvordan du indsætter sensoren.

4 Påbegynd overvågning


Trin 1: Start CGM-sensoren

Trin 2: Vent på, at sensoren varmer op


Trin 3: Opsætning af advarsler

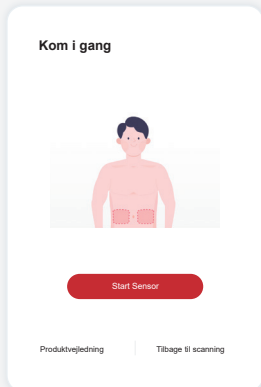

Når sensoren er sat i, vil din CGM-app bede dig om at starte sensoren. Tryk på "Start" for næste trin.

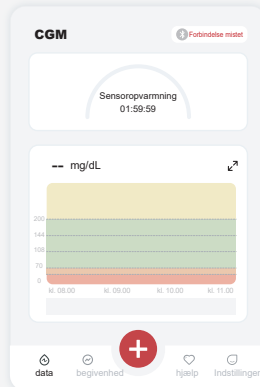


Tryk på "Start" for at begynde en 2-timers sensoropvarmning. Der vil ikke være nogen glukosemålinger eller alarmer, før opvarmningen er slut. Hold appen åben og din smart-enhed inden for 20 fod (cirka 6 meters) afstand af senderen under sensoropvarmningen.

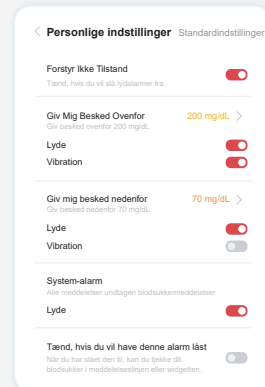

Forsigtighed: Du vil altid modtage en alarm om lav glukose, når din sensors glukoseværdi er 55 mg/dL eller derunder. For detaljerede oplysninger om glukosealarm-er og systemopsætning, se "Vigtige sikkerhedsoplysninger" i brugsanvisningen.

Trin 4: Kontroller din glukose

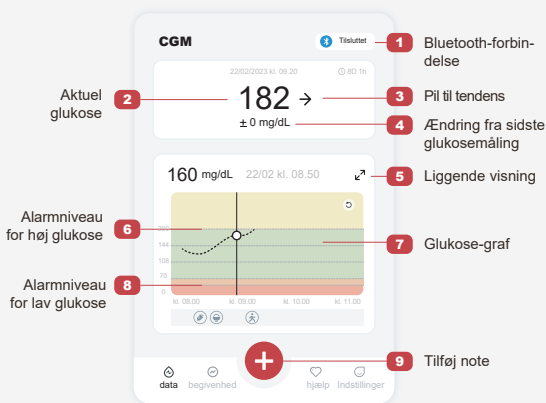


Pil for Glukosetendens

Retning, din glukose bevæger sig i

Pil	Hvad betyder det	Pil	Hvad betyder det
↗	Glukosen stiger hurtigt	↘	Glukose falder langsomt
↑	Glukosen stiger hurtigt	↓	Glukosen falder hurtigt
↖	Glukosen stiger langsomt	↙	Glukosen falder hurtigt
→	Glukosen er stabil		

Glukose-graf


Graf over dine aktuelle og gemte glukosemålinger

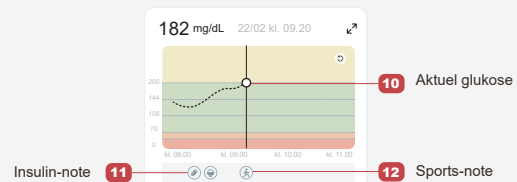

5 Afslut overvågning

Trin 1: Bekræft, at den aktuelle session er afsluttet

Når den 15 dage lange overvågningssession er afsluttet, vil appen bede dig om at skifte en ny sensor eller gennemgå historikrapporten.

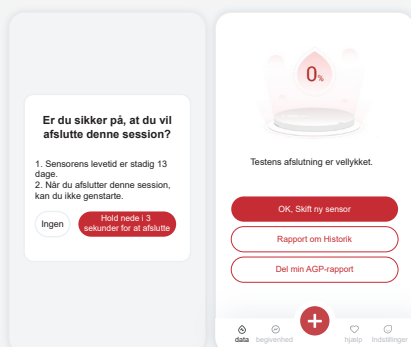

Trin 2: Fjern Sensoren

- Træk op i kanten af klæbemidlet.
- Træk langsomt klæbemidlet væk fra huden i én bevægelse.



Trin 3: Bortskaffelse

Rør ikke ved sensoren, og den kan ikke genbruges, når den er fjernet. Bortskaf den brugte sensor i henhold til lokale bestemmelser.

