

## Sustav za Kontinuirano Praćenje Glukoze CGM APP - Vodič za pokretanje

### i3 Pregled CGM sustava

Pogledajte korisnički priručnik za potpune upute i informacije o sustavu.

Korisnički priručnik dostupan je u elektroničkom obliku. Posjetite internetsku stranicu [iCan-cgm.com](http://iCan-cgm.com) za preuzimanje PDF dokumenta.

Ako vam je potreban tiskani primjerak korisničkog priručnika, obratite se prodavaču ili pošaljite zahtjev na adresu e-pošte

[support@icancgm.com](mailto:support@icancgm.com). Primjerak će vam se besplatno dostaviti u roku od sedam dana.


Ako imate pitanja, pošaljite e-poštu na [support@icancgm.com](mailto:support@icancgm.com)

Svi grafički prikazi su reprezentativni. Vaš proizvod može izgledati drugačije.

#### Komplet senzora



#### Paket senzora

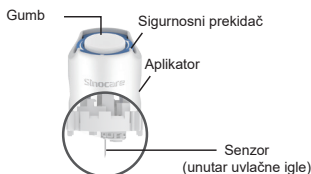


#### Paket odašiljača

Odašiljač



Nosač odašiljača

#### iCan CGM APP

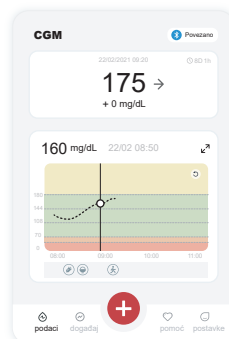

- 1 Priprema
- ↓
- 2 Postavite mobilnu aplikaciju
- ↓
- 3 Umetnite senzor
- ↓
- 4 Započnite praćenje
- ↓
- 5 Kraj praćenja

## 1 Započnite


### 1. korak: Instalirajte iCan CGM APP

Preuzmite iCan CGM APP iz App Store-a ili Google Play-a



### 2. korak: Prijavite se na svoj iCan CGM račun

- a. Prijavite se ako već imate račun.
- b. Kliknite na "Registracija" na dnu ako ste novi u sustavu. Aplikacija će vas voditi kroz informativne videozapise i zaslone. Pritisnite "Dalje" za nastavak dok vas ne odvede na stranicu za skeniranje QR koda. Ostavite svoju aplikaciju uključenu cijelo vrijeme.

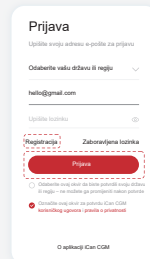


## 2 Uparite s odašiljačem

### 1. korak: Izvucite paket odašiljača



Izvucite paket odašiljača s dna kutije paketa senzora.

### 2. korak: Provjerite da se SN (serijski broj) kodovi podudaraju

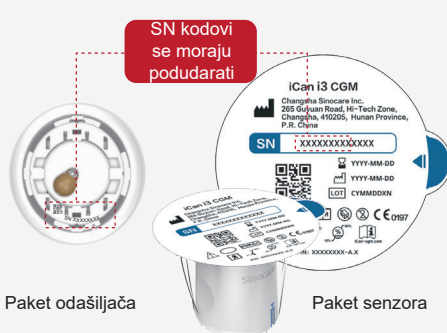

Prije uparivanja senzora s odašiljačem provjerite podudaraju li se prvih osam znamenki serijskog broja paketa senzora i serijskog broja odašiljača.

### 3. korak: Uparite s odašiljačem






- a. Otvorite aplikaciju i provjerite jeste li uključili Bluetooth.
- b. Prijavite se na svoj račun i pomoću aplikacije skenirajte QR kod na paketu senzora.
- c. Uparivanje se događa automatski. Ne zatvarajte aplikaciju i držite je unutar 6 metara dok prelazite na sljedeći korak. Ako ručno unesete SN kod, molimo kliknite "Dalje" da biste nastavili.
- d. Držite telefon blizu i pripremite umetanje u sljedećem koraku

## 3 Umetnite senzor

Da biste saznali kako umetnuti senzor, molimo slijedite "Kratki Vodič za Sustav za Kontinuirano Praćenje Glukoze" u vašem paketu.

## 4 Započnite praćenje

1. korak: Pokrenite CGM senzor 2. korak: Pričekajte da se senzor zagrije 3. korak: Postavite upozorenja

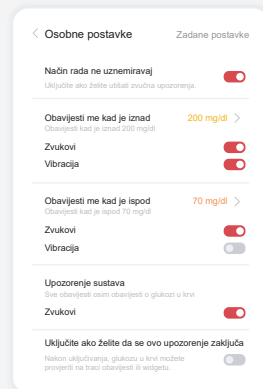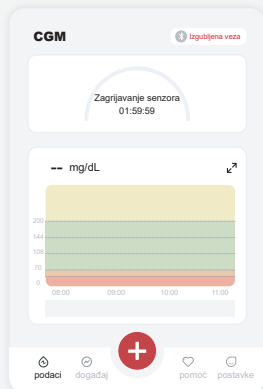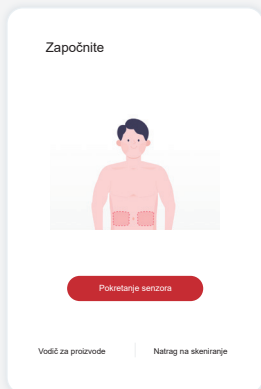

Kada je senzor uspješno umetnut, vaša CGM APP će zatražiti od vas da pokrenete senzor. Dodirnite "Start" za sljedeći korak.

Dodirnite "Start" za početak dvosatnog zagrijavanja senzora. Neće biti očitavanja glukoze niti upozorenja dok zagrijavanje ne završi. Neka aplikacija bude otvorena, a vaš pametni uređaj unutar 20 stopa od odašiljača dok se senzor zagrijava.

**Oprez:** Zadano ćete primiti hitno upozorenje o niskoj razini glukoze kada je očitavanje glukoze senzorom 55 mg/dL ili niže. Za detaljne informacije o upozorenjima o glukozi i postavljanju sustava idite na „Važne sigurnosne informacije“ u Uputama za uporabu.

### 4. korak: Provjerite glukozu




Strelica trenda glukoze  
Smjer u kojem se kreće vaša glukoza

Strijela	Što znači	Strijela	Što znači
↗	Glukoza brzo raste	↘	Glukoza polako opada
↑	Glukoza brzo raste	↓	Glukoza brzo opada
↖	Glukoza polako raste	↙	Glukoza brzo opada
→	Glukoza stabilna		

Grafikon Glukoze


Grafikon vaših trenutačnih i pohranjenih očitavanja glukoze

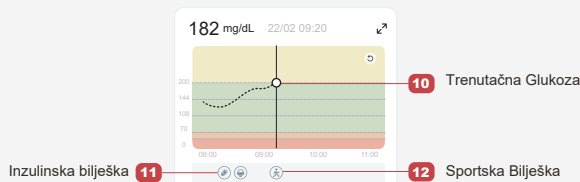

## 5 Kraj praćenja


### 1. korak: Potvrdite da je trenutačna sesija završena

Kada 15-dnevna sesija praćenja završi, aplikacija će od vas tražiti da promijenite senzor ili pogledate izvješće o povijesti.

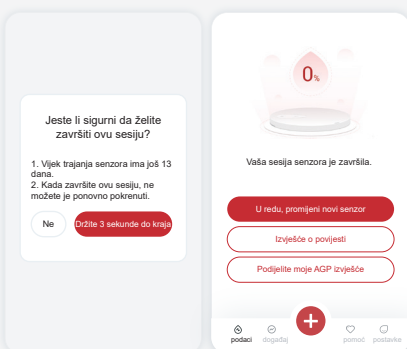

### 2. korak: Uklanjanje Senzora

a. Povucite rub ljepljive trake prema gore.  
b. Polako odlijepite ljepljivu traku s kože jednim pokretom.

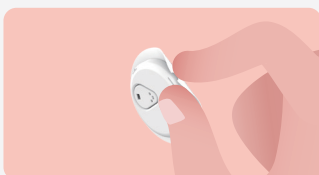

### 3. korak: Odlaganje

Ne dirajte senzor i senzor se ne može ponovno koristiti nakon uklanjanja. Bacite iskorišteni senzor u skladu s lokalnim propisima.

