

Sistem de Monitorizare Continuă a Glicemiei Ghid de Pornire-CGM APP

Prezentare Generală a Sistemului i3 CGM


Consultați Ghidul Utilizatorului pentru instrucțiuni complete privind Sistemul și informații.

Ghidul Utilizatorului este furnizat în format electronic. Puteți vizita site-ul iCan-cgm.com pentru a descărca un fișier PDF.

Dacă aveți nevoie de o copie tipărită a Ghidului Utilizatorului, vă rugăm să contactați dealerul sau să trimiteți cererea la adresa de email: support@icancgm.com. Aceasta va fi furnizată gratuit în termen de șapte zile.

În cazul în care aveți întrebări, vă rog să trimiteți un email la support@icancgm.com

Toate graficele sunt reprezentative. Produsul dumneavoastră poate arăta diferit.

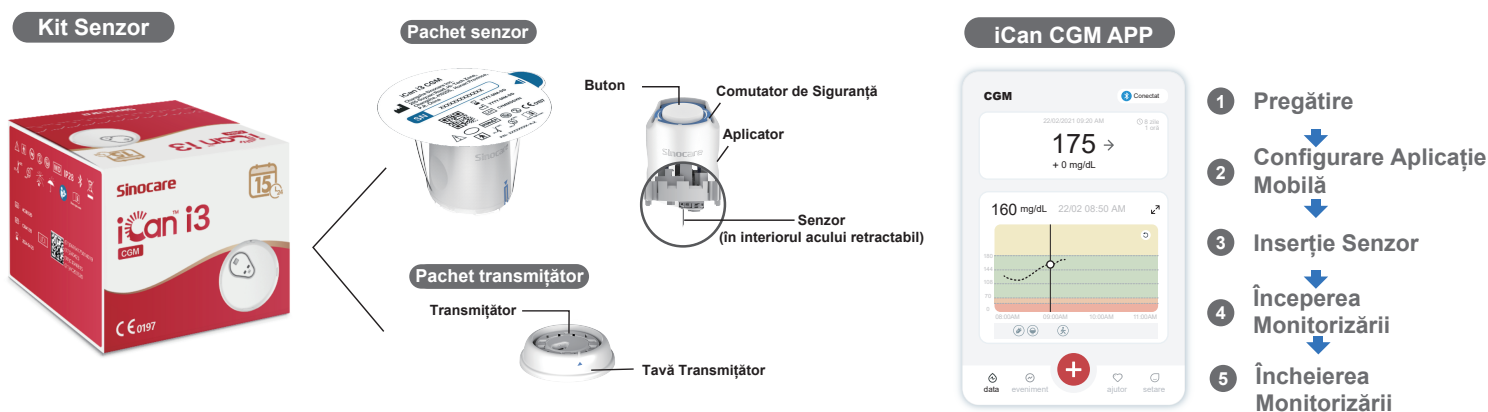

1 Să Începem


Pasul 1: Instalați iCan CGM APP

Descărcați iCan CGM APP din App Store sau Google Play




Pasul 2: Autentificați-vă la contul dvs. iCan CGM

a. Autentificați-vă dacă aveți deja un cont.
b. Atingeți „Înregistrare” în partea de jos dacă sunteți nou în sistem. Aplicația vă va ghida prin videoclipuri și ecrane informative. Atingeți „Următorul” pentru a continua până când ajungeți la pagina de Scanare Cod QR. Mențineți aplicația deschisă pe tot parcursul.

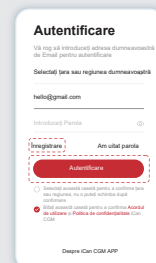


2 Asociați cu Transmițătorul

Pasul 1: Scoateți pachetul transmițătorului

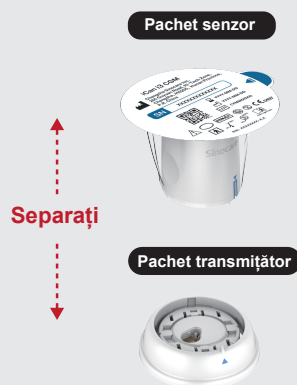

Scoateți pachetul transmițătorului din partea de jos a cutiei pachetului senzorialui.

Pasul 2: Verificați codurile SN (Numărul de serie) pentru a se potrivi

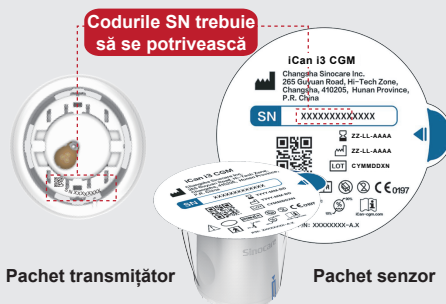

Verificați dacă se potrivesc primele 8 cifre din codurile SN ale pachetului senzorialui și codurile SN ale transmițătorului înainte de a asocia senzorul cu transmițătorul.

Pasul 3: Asociați cu Transmițătorul




a. Deschideți aplicația și vă asigurați că Bluetooth este activat.
b. Autentificați-vă la contul dumneavoastră și utilizați aplicația pentru a scana codul QR de pe pachetul senzorialui.
c. Asocierea se întâmplă automat. Nu închideți aplicația și păstrați la o distanță de maxim 6 metri în timp ce treceți la următorul pas. Dacă introduceți manual codul SN, apăsați „Următorul” pentru a continua.
d. Țineți telefonul aproape și pregătiți inserția în pasul următor

3 Inserție Senzor


Urmați „Ghidul de pomire rapidă a Sistemului de Monitorizare Continuă a Glicemiei” din pachetul dumneavoastră pentru a învăța cum să inserați senzorul.

4 Începerea Monitorizării


Pasul 1: Start senzor CGM Pasul 2: Așteptați să se încălzească senzorul Pasul 3: Configurați alertele

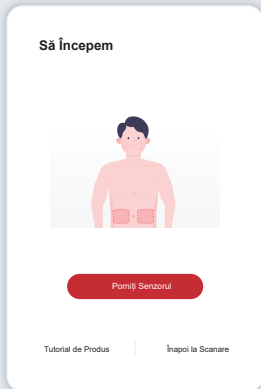

Când senzorul este inserat cu succes, aplicația dvs. CGM vă va solicita să porniți senzorul. Atingeți „Start” pentru următorul pas.

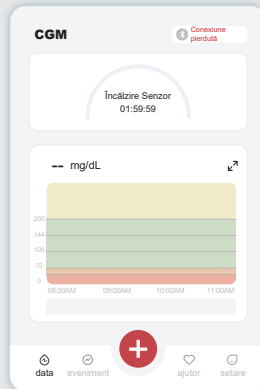

Atingeți „Start” pentru a începe încălzirea senzorului timp de 2 ore. Nu va exista nicio citire a glicemiei sau alerte până când încălzirea nu se va încheia. În timpul încălzirii senzorului mențineți aplicația deschisă și dispozitivul inteligent în interiorul a 20 de picioare de transmisător.

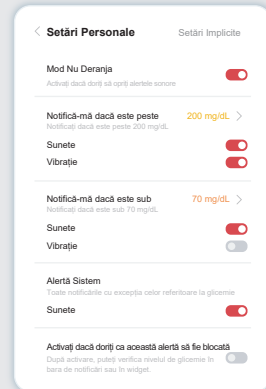

Atenție: Veți primi întotdeauna o alertă de Urgență Glicemie Scăzută în mod implicit atunci când valoarea glicemiei senzorului este de 55 mg/dL sau mai mică. Pentru informații detaliate privind alertele de glicemie și configurarea sistemului, consultați „Informații Importante despre Siguranță” în Instrucțiunile de Utilizare.

Pasul 4: Verificați glicemia dumneavoastră



Săgeata Tendinței Glicemiei

Direcția în care se îndreaptă glicemia dumneavoastră

Săgeată	Ce înseamnă	Săgeată	Ce înseamnă
↗	Glicemia crește rapid	↘	Glicemia scade încet
↑	Glicemia crește repede	↓	Glicemia scade repede
↖	Glicemia crește încet	↙	Glicemia scade rapid
→	Glicemia stabilă		

Graficul Glicemiei


Grafic al citirilor curente și stocate ale glicemiei dumneavoastră



5 Încheierea Monitorizării


Pasul 1: Confirmați că sesiunea curentă s-a încheiat

Când sesiunea de monitorizare de 15 zile este completă, aplicația vă va îndruma să schimbați un nou senzor sau să consultați Raportul de Istoric.

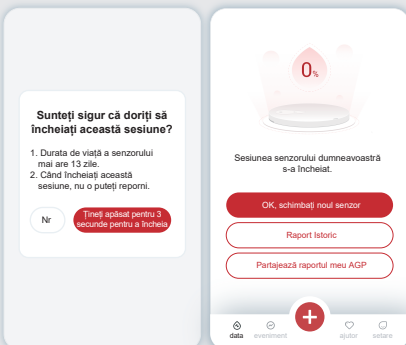

Pasul 2: Scoatere Senzor

a. Trageți marginea adezivului în sus.
b. Scoateți cu grijă adezivul de pe pielea dvs. dintr-o singură mișcare.

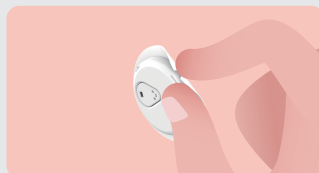

Pasul 3: Eliminare

Nu atingeți senzorul, iar acesta nu poate fi reutilizat după îndepărtare. Eliminați senzorul utilizat conform reglementărilor locale.

