

## Sürekli Glikoz İzleme Sistemi CGM APP-Başlangıç Kılavuzu

### i3 CGM Sistemine Genel Bakış


Tam Sistem talimatları ve bilgileri için Kullanıcı Kılavuzunuza bakın.

Kullanıcı Kılavuzu elektronik formatta sunulmaktadır. iCan-cgm.com adresini ziyaret ederek internet sitesinden PDF dosyasını indirebilirsiniz.

Kullanıcı Kılavuzunun basılı bir nüshasına ihtiyacınız varsa, lütfen bayi ile iletişime geçin veya talebi e-mail adresimize gönderin: [support@icancgm.com](mailto:support@icancgm.com). Kılavuz yedi gün içinde ücretsiz olarak sağlanacaktır.

Herhangi bir sorunuz olması halinde, lütfen [support@icancgm.com](mailto:support@icancgm.com) adresine e-posta gönderin.

Bütün grafikler temsilidir. Ürünlerinizin görünümü farklı olabilir.

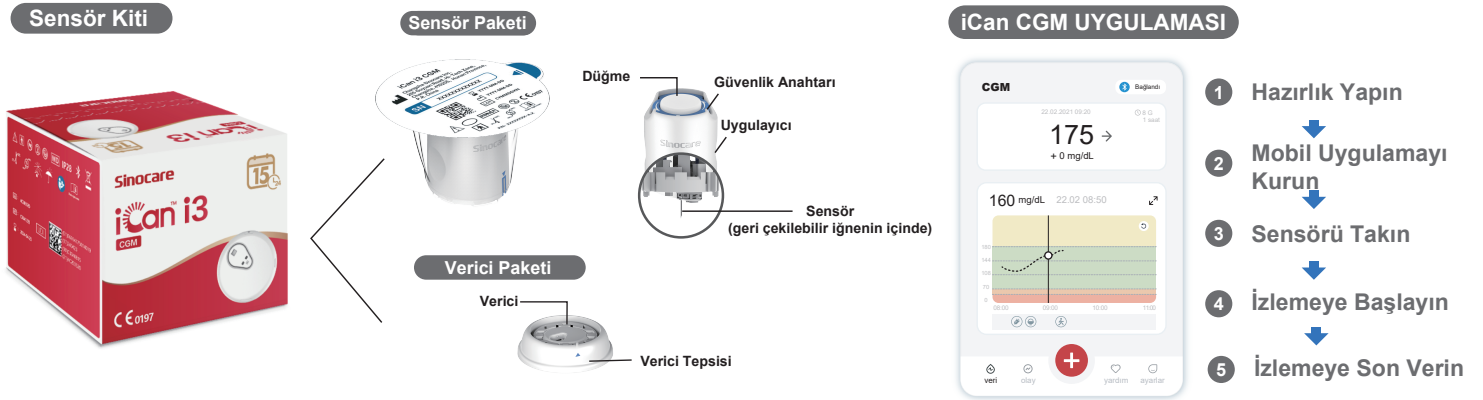

## 1 Başlarken


### Adım 1: iCan CGM Uygulamasını yükleyin

App Store veya Google Play'den iCan CGM Uygulamasını indirin




### Adım 2: iCan CGM Hesabınıza Giriş Yapın

a. Zaten bir hesabınız varsa giriş yapın.  
b. Sistemde yeniyseniz en alttaki "Kaydol" seçeneğine basın. Uygulama sizi bilgilendirici videolar ve görüntüler aracılığıyla yönlendirecektir. Sizi QR Kodu Tarama sayfasına yönlendirene kadar devam etmek için "Sıradaki"ne dokununuz. Uygulamanızı tüm süre boyunca açık tutunuz.

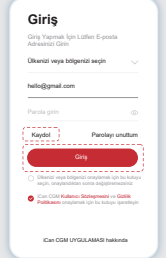


## 2 Verici ile Eşleştirme

### Adım 1: Verici Paketini dışarı çıkarın

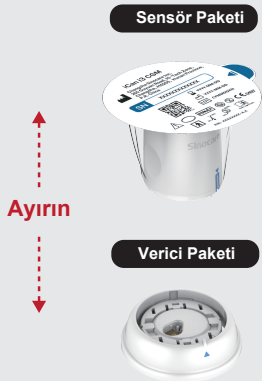

Verici Paketini Sensör Paketi kutusunun altından dışarı çıkarın.

### Adım 2: SN (Seri Numarası) Kodları Eşleşmesini Kontrol Edin

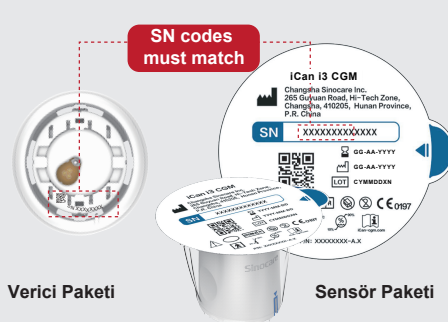

Sensörünüzü Verici ile eşleştirmeden önce Sensör Paketi ve Verici SN kodlarının ilk 8 hanesinin birbirine eşleşip eşleşmediğini kontrol edin.

### Adım 3: Verici ile Eşleştirin




a. Uygulamayı açın ve Bluetooth'u açtığınızdan emin olun.  
b. Hesabınıza giriş yapın ve Uygulamayı kullanarak Sensör Paketi üzerindeki QR Kodunu tarayın.  
c. Eşleştirme otomatik olarak gerçekleşir. Uygulamayı kapatmayın ve bir sıradaki aşamaya geçerken 6 metre içinde tutunuz. SN kodunu elle girderseniz, devam etmek için lütfen "Sıradaki"ne tıklayın.  
d. Telefonunuzu yakınızdaki tutunuz ve sıradaki adımda takma işlemini hazırlayın

### 3 Sensörü Takın

Sensörün nasıl takılacağını öğrenmek için lütfen paketinizdeki "Sürekli Glikoz İzleme Sistemi Hızlı Başlangıç Kılavuzu" nu izleyin.


### 4 İzlemeye Başlayın

#### Adım 1: CGM sensörünü başlat

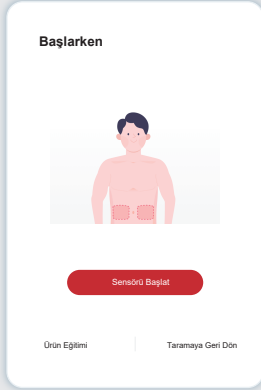


Sensör başarıyla takıldığında, CGM Uygulamanız sizden sensörü başlatmanızı isteyecektir. Sıradaki adım için "Başlat" a dokununuz.

#### Adım 2: Sensörün ısınmasını bekleyin

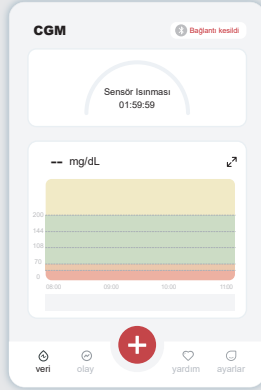

Sensörün 2 saatlik ısınmasını başlatmak için "Başlat" a dokununuz. Isınma sona erene kadar herhangi bir glikoz okuması veya uyarısı gerçekleşmeyecektir. Sensör ısınması sırasında Uygulamayı açık ve akıllı cihazınızı vericinin 20 fit yakınında tutunuz.

#### Adım 3: Alarmları kurun

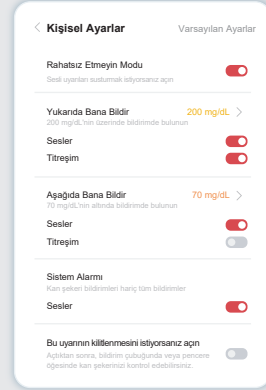

**Dikkat:** Sensör glikoz değeriniz 55 mg/dL veya altında olduğunda varsayılan olarak her zaman Acil Düşük Glikoz Uyarısı alırsınız. Glikoz uyarıları ve sistem kurulumu ile ilgili ayrıntılı bilgi için Kullanım Yönergeleri'ndeki "Önemli Güvenlik Bilgileri" bölümüne gidiniz.

#### Adım 4: Glikozunuzu kontrol edin




#### Glikoz Eğilim Oku

Glikozunuzun gittiği yön

Ok	Ne anlama geliyor	Ok	Ne anlama geliyor
↗	Glikoz hızla yükseliyor	↘	Glikoz yavaş düşüyor
↑	Glikoz hızla yükseliyor	↓	Glikoz hızla düşüyor
↖	Glikoz yavaşça yükseliyor	↙	Glikoz hızla düşüyor
→	Sabit glikoz		

#### Glikoz Grafiği


Mevcut ve kayıtlı glikoz değerlerinizin grafiği

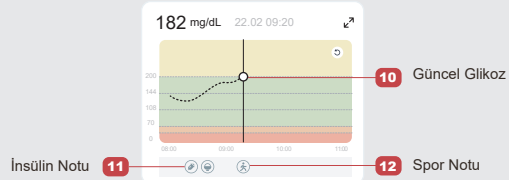

### 5 İzlemeye Son Verin


#### Adım 1: Mevcut oturumun tamamlandığını onaylayın

15 günlük izleme oturumu tamamlandığında, Uygulama sizden yeni bir sensör değiştirmenizi veya Tarih Raporunu gözden geçirmenizi isteyecektir.

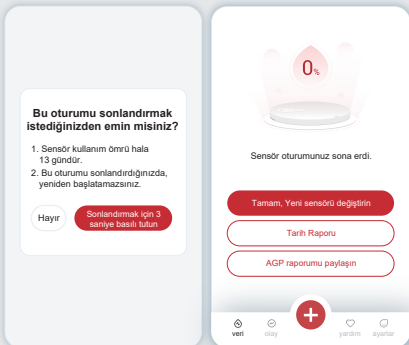

#### Adım 2: Sensörü Çıkarma

- Yapışkanın kenarını yukarı çekin.
- Yapışkanı tek bir hareketle yavaşça cildinizden çıkarın.

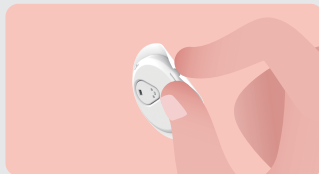

#### Adım 3: İmha etme

Sensöre dokunmayın ve sensör çıkarıldıktan sonra tekrar kullanılamaz. Kullanılmış sensörü yerel mevzuata göre atınız.

